




Q&R

SMARTCLIC®

APPLICATION

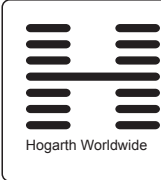

Project and Job Number	Client	Type Area Box (h x w)
CR12252_H214999_P418083	Pfizer	
Publication	Market	Trim Box (h x w)
	Belgium	297.00 x 210.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w)
		303.00 x 216.00 mm
Contact		Date & Time
		22/11/2022 17:49

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



APPLICATION: FONCTIONNEMENT

Comment coupler le dispositif SMARTCLIC® avec l'application ?

Le dispositif SMARTCLIC® se connecte à l'application grâce à la connexion sans fil Bluetooth.² Pour initier la connexion, rendez-vous dans le menu de l'appareil SMARTCLIC® et sélectionnez «Connexion», «Configuration» puis «Couplage d'appareil».² Pour synchroniser votre dispositif avec l'application, retournez au menu et sélectionnez «Connexion» et «Synchroniser avec l'application».²

Comment créer un compte SMARTCLIC® ? Dois-je m'inscrire via un compte de réseau social ?

L'utilisation de l'application SMARTCLIC® ne nécessite pas de compte, d'inscription, de connexion ou de mot de passe.

Que dois-je faire si je souhaite arrêter de me servir de l'application SMARTCLIC® ?

Si vous ne désirez plus que votre dispositif SMARTCLIC® soit connecté à l'application, rendez-vous dans le menu du SMARTCLIC® et sélectionnez «Connexion», «Configuration», «Oublier» puis confirmez cette action.² N'oubliez pas de supprimer l'application de votre téléphone.

Puis-je également utiliser l'application sur un iPad, un ordinateur portable ou de bureau, ou sur tout autre appareil ?

L'application SMARTCLIC® a été conçue pour être utilisée avec les smartphones, mais elle peut également être installée sur les tablettes.

Si je change de téléphone portable, comment puis-je importer les données de l'application SMARTCLIC® sur mon nouveau téléphone portable ?

Les applications, y compris l'application SMARTCLIC®, devraient être automatiquement transférées lors de la configuration de votre nouveau téléphone. Le processus spécifique dépendra de votre service de stockage cloud, du système d'exploitation de votre téléphone et du fait que votre ancien et votre nouveau téléphone utilisent ou non le même système d'exploitation.

Puis-je synchroniser l’application avec le calendrier que j’utilise tous les jours ?

Le calendrier de SMARTCLIC® ne peut être synchronisé avec aucun autre calendrier.

Puis-je exporter mes données depuis l’application SMARTCLIC® vers une autre application de suivi ?

Les données de l’application SMARTCLIC® ne peuvent être exportées vers une autre application de suivi.

Si je change de traitement, puis-je continuer d’utiliser la même application pour enregistrer mes symptômes ?

Vous pourriez potentiellement continuer d’utiliser certaines fonctionnalités de l’application SMARTCLIC® après un changement de traitement. Cependant, l’application en elle-même n’aurait qu’une valeur limitée, car elle a été conçue pour compléter les fonctionnalités du SMARTCLIC®.

J’éprouve des difficultés à taper, puis-je saisir les données par commandes vocales ?

Le système d’exploitation de nombreux appareils est doté de commandes vocales. Lorsque ces commandes sont activées, elles peuvent être utilisées avec n’importe quelle application, y compris l’application SMARTCLIC®. Cependant, la saisie de certaines données (p. ex. l’enregistrement de certains symptômes) ne peut être effectuée par commandes vocales et doit être faite manuellement.

Je n’ai pas de connexion à l’Internet ou de téléphone portable, puis-je quand même utiliser le SMARTCLIC® sans l’application ?

Vous pouvez utiliser le SMARTCLIC® sans l’application. Aucune des fonctionnalités de base du dispositif, que ce soit l’auto-injection ou les paramètres d’injection configurables, ne requiert l’utilisation de l’application.^{1,2}

APPLICATION: FONCTIONNALITÉS

Comment l'application peut-elle m'aider lors de l'injection ?

L'application SMARTCLIC® offre une série de fonctionnalités facultatives qui peuvent vous aider tout au long du processus d'injection:

- Envoi de rappels d'injection
- Utilisation d'un chronomètre pour compter les minutes d'attente avant que l'Enbrel® atteigne la température ambiante en vue de l'injection
- Enregistrement automatique de la date et de l'heure de chaque injection pour en permettre le suivi
- Enregistrement de vos sites d'injection, ce qui en facilite la rotation.

Quelles fonctionnalités sont offertes par l'application SMARTCLIC® ?

L'application SMARTCLIC® offre un large éventail de fonctionnalités facultatives:

- Aide dans le processus d'injection grâce à des rappels d'injection, au suivi des injections et d'autres outils
- Envoi de rappels pour des événements tels que des consultations médicales
- Suivi de vos autres traitements
- Suivi du cycle de vie de votre dispositif
- Enregistrement et suivi de vos symptômes
- Création de courts rapports de vos symptômes et de votre historique d'injections que vous pouvez envoyer ou partager avec votre professionnel de santé.

Puis-je obtenir des conseils sur l'auto-injection ?

L'application SMARTCLIC® n'offre pas de conseils généraux sur l'auto-injection.

Puis-je enregistrer mes sites d'injection ?


Oui, l'application SMARTCLIC® peut être utilisée pour suivre et garder un historique des sites d'injection précédents. L'utilisation de cette fonctionnalité vous permettra de vous rappeler le dernier site d'injection lorsque vous en choisissez un pour la prochaine injection. Le nouveau site d'injection doit toujours se trouver au moins 3 cm de l'endroit où vous avez effectué votre dernière injection et à au moins 5 cm de votre nombril.¹

Comment puis-je programmer des rappels pour mes injections ?

Pour programmer des rappels d'injection, ou pour tout autre rendez-vous ou événement, l'application SMARTCLIC® vous demandera de saisir les détails principaux de chaque événement (type de rappel, date, heure). Après avoir effectué ces choix, cliquez sur «Enregistrer» pour ajouter le rappel à votre calendrier personnel.


Puis-je ajouter mes consultations médicales au calendrier du SMARTCLIC® ?

Oui, vous pouvez utiliser l'application SMARTCLIC® pour configurer et recevoir des rappels de consultations médicales, ou pour tout autre événement ou rendez-vous.

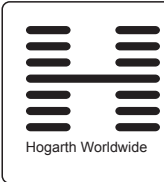

Project and Job Number CR12252_H214999_P418083	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm
Contact	Date & Time 22/11/2022 17:49	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

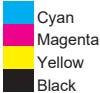

Puis-je configurer de multiples rappels ?

Oui, de multiples rappels peuvent être ajoutés au calendrier de votre SMARTCLIC®.

Puis-je définir une consultation comme récurrente ?

Non, les consultations ne peuvent être définies comme récurrentes dans l’application SMARTCLIC®.

Puis-je contacter mon médecin ou tout autre professionnel de santé grâce à l’application ?

Non, vous ne pouvez pas contacter votre médecin ou un autre professionnel de santé à travers l’application SMARTCLIC®.

Puis-je discuter avec d’autres patients via l’application ?

Non, vous ne pouvez pas discuter avec d’autres patients à travers l’application SMARTCLIC®.

Puis-je enregistrer les effets secondaires dans l’application ?

Aucune fonctionnalité de l’application SMARTCLIC® n’est spécifiquement conçue pour suivre ou enregistrer les effets secondaires. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.¹

Comment puis-je enregistrer mes niveaux de douleur au fil du temps et partager cette information avec mon médecin ?

L’application SMARTCLIC® peut être utilisée pour enregistrer et suivre des détails importants concernant une variété de symptômes de maladies, y compris la douleur. L’application peut également générer des rapports récapitulatifs des symptômes qui mettent visuellement en évidence vos symptômes au fil du temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager ces rapports avec votre médecin.

L’application SMARTCLIC® peut-elle m’aider à déceler des tendances dans mes symptômes enregistrés, que je pourrais ensuite partager avec mon médecin ?

Quel que soit votre choix, l’application SMARTCLIC® peut générer des rapports sur les données qui résument l’historique de votre traitement et certains symptômes associés à votre maladie. Ces courts rapports – qui peuvent être partagés avec votre médecin – peuvent aider à visualiser l’évolution de vos symptômes et l’historique de vos injections au fil du temps.

APPLICATION: DÉPANNAGE ET SÉCURITÉ

Que dois-je faire si l'application SMARTCLIC® se fige ou rencontre un problème technique ?

Toute application, y compris l'application SMARTCLIC®, peut se figer ou rencontrer un problème technique. Pour résoudre le problème, utilisez les mêmes tactiques que pour n'importe quelle autre application (p. ex., fermez et redémarrez l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone, etc).

Vais-je perdre toutes mes données si je supprime l'application ou perds mon téléphone ?

Si vous supprimez l'application SMARTCLIC® ou perdez votre téléphone, et si vous n'avez pas fait de sauvegarde des données, vos informations seront perdues. Cependant, si votre téléphone effectue régulièrement des sauvegardes, vous devriez pouvoir facilement restaurer ces données.

Mes informations sont-elles en sécurité sur l'appareil ?

Toutes les données sont cryptées dans l'application SMARTCLIC®, ce qui rend vos informations très sûres.

Est-ce que l'application SMARTCLIC® me demandera mon adresse e-mail ou mes coordonnées ?

L'application SMARTCLIC® ne requiert pas de compte et par conséquent ne nécessite pas, ne demandera ni n'accédera jamais à votre adresse e-mail ou vos coordonnées.

Où mes données sont-elles stockées ?

Vos données ne sont stockées que sur votre appareil portable et ne sont pas automatiquement partagées avec votre professionnel de santé ou quiconque d'autre.

Mes données seront-elles supprimées après un certain temps ?

Non, l'application SMARTCLIC® ne supprime pas automatiquement les données.

Où puis-je trouver des détails concernant le respect de ma vie privée ?

Les détails concernant le respect de votre vie privée se trouvent dans la section Conditions d'utilisation/Politique de confidentialité, qui est accessible sous l'onglet «Paramètres» de l'application SMARTCLIC®.

Notes

 Hogarth Worldwide	Project and Job Number CR12252_H214999_P418083	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)	Operator	Proofreader	Cyan Magenta Yellow Black
	Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm	Line Manager	Account Manager	
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm	Light Box	Light Box	
	Contact	Date & Time 22/11/2022 17:49				


SMARTCLIC®

220663 -OCT 2022 © Pfizer Inc.

Références: 1. Notice d'Enbrel 2. Manuel d'utilisation SMARTCLIC.

Editeur responsable: Pfizer SA, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles



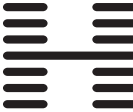

Hogarth Worldwide

Project and Job Number	CR12252_H214999_P418083
Publication	
Insertion Date	
Contact	

Client	Pfizer
Market	Belgium
Operator	

Type Area Box (h x w)	
Trim Box (h x w)	297.00 x 210.00 mm
Bleed Box (h x w)	303.00 x 216.00 mm
Date & Time	22/11/2022 17:49

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan

Magenta

Yellow

Black