



Uw handleiding voor
SMARTCLIC®





Hogarth Worldwide

Project and Job Number	CR12252_H214999_P418078
Publication	
Insertion Date	
Contact	

Client	Pfizer
Market	Belgium
Operator	

Type Area Box (h x w)	
Trim Box (h x w)	297.00 x 210.00 mm
Bleed Box (h x w)	303.00 x 216.00 mm
Date & Time	22/11/2022 18:25

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



Cyan
Magenta
Yellow
Black

SMARTCLIC®


1. Inleiding

SMARTCLIC® is een herbruikbaar apparaat voor zelfinjectie dat gebruikmaakt van patronen met één dosis voor de toediening van de Enbrel®-behandeling.¹ Afhankelijk van uw voorschrift krijgt u patronen van 25 mg of 50 mg.¹



Enbrel-patronen hebben een **blauw naalddopje** waarop de dosis duidelijk vermeld staat. Ze **bevatten een naald**.²

SMARTCLIC wordt ook geleverd met een **oefenpatroon**, voorzien van een **geel etiket** en een **grijs naalddopje**.² Deze bevat **geen geneesmiddel of naald**, en kan tot 20 keer gebruikt worden om u te helpen **oefenen met injecteren**.²

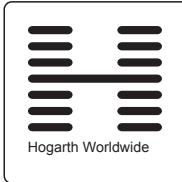

Project and Job Number CR12252_H214999_P418078	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm
Contact		Date & Time 22/11/2022 18:25

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box





Het SMARTCLIC®-apparaat moet op kamertemperatuur (max. 25°C) bewaard worden en mag niet ingevroren worden.²



De Enbrel®-patronen voor dosisafgifte moeten in de koelkast tussen 2 °C en 8 °C in hun oorspronkelijke verpakking bewaard worden. Ze mogen niet ingevroren worden.¹

De Enbrel-patronen mogen niet in de koelkast teruggezet worden nadat ze kamertemperatuur (max. 25°C) bereikt hebben.¹ De Enbrel-patronen kunnen maximaal 4 weken bij kamertemperatuur bewaard worden.

De patronen worden geleverd met een Enbrel-bijsluiter. Lees deze bijsluiter zorgvuldig. Hierin staat belangrijke informatie over uw medicatie.

SMARTCLIC®

2. SMARTCLIC®

SMARTCLIC wordt **ingeschakeld door de injectieknop ingedrukt te houden of door een patroon in het apparaat te plaatsen.**²

Na het inschakelen zal het apparaat u **door de eerste installatie leiden.**²

SMARTCLIC kan ook **gekoppeld worden aan een app** om u te helpen **uw injecties² en andere gezondheidsgegevens op te volgen.**

SMARTCLIC is 3 jaar houdbaar vanaf het eerste gebruik, of 160 injecties, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.²



Hogarth Worldwide

Project and Job Number CR12252_H214999_P418078	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm
Contact	Date & Time 22/11/2022 18:25	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan

Magenta

Yellow

Black

SMARTCLIC® wordt geleverd met een **Gebruikershandleiding**. Deze bevat belangrijke informatie over verschillende functies van het apparaat, zoals een instelling waarmee **de snelheid van de injecties kan aangepast worden** (snel, gemiddeld of langzaam).²

Instellingen kunnen niet gewijzigd worden als een patroon in SMARTCLIC geplaatst wordt, omdat het apparaat dan in de modus ‘Alleen injecteren’ staat.

SMARTCLIC®



 Hogarth Worldwide	Project and Job Number CR12252_H214999_P418078	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)	Operator	Proofreader	 Cyan Magenta Yellow Black
	Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm	Line Manager	Account Manager	
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm	Light Box	Light Box	
	Contact		Date & Time 22/11/2022 18:25			

3. Voorbereiden op de injectie

Maak een tafel schoon en was uw handen voordat u het apparaat gebruikt en zorg ervoor dat u de volgende spullen bij de hand hebt¹

- › De Enbrel®-doos met de patronen
- › Het SMARTCLIC®-apparaat
- › Alcoholdoekjes (meegeleverd in de Enbrel-doos)
- › Schone wattenbolletjes of gaasjes (niet meegeleverd)
- › Een geschikt afvalbakje (niet meegeleverd)



Plaats nadat u **een Enbrel-patroon uit de doos gehaald hebt de ongebruikte patronen terug in de koelkast**. Bewaar Enbrel-patronen altijd in de oorspronkelijke verpakking.¹

Controleer of de houdbaarheidsdatum niet verstreken is en of de dosering klopt met wat voorgeschreven is.¹



Het geneesmiddel dat door het controlevenster waargenomen kan worden, moet **helder of licht melkachtig, kleurloos tot lichtgeel of lichtbruin** zijn. Het kan ook kleine witte of bijna doorzichtige eiwitdeeltjes bevatten, wat normaal is.¹


Een patroon mag niet gebruikt worden als de oplossing verkleurd of troebel is, of andere deeltjes bevat dan die welke hierboven beschreven zijn.¹

Laat de patroon met Enbrel 15-30 minuten op kamertemperatuur (max. 25°C) komen voor een meer prettigere injectie. Gebruik geen andere methoden om uw patroon op te warmen.¹

De patroon mag nooit geschud worden.¹

Kies uw **injectieplaats**, die **ten minste 5 cm van uw navel en ten minste 3 cm van de laatste injectieplaats** verwijderd moet zijn.¹


Zelftoediening¹

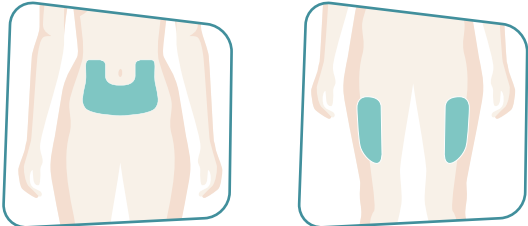

Buik
Houd ten minste
5 cm afstand
van uw navel

Bovenbenen

**Toediening door
een zorgverlener¹**

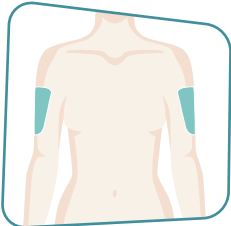

Buitenkant van de bovenarmen
Alleen door een zorgverlener

Vorbereitung
op een Injektion

U kunt **zichzelf injecteren** in uw **bovenbenen of buik**. Een **zorgverlener** kan ook injecteren in de buitenste zone van uw **bovenarm**.¹

Enbrel[®] mag niet geïnjecteerd worden in huidgebieden waaronder **veel bot ligt of die kneuzingen, breuken, rode, pijnlijke (gevoelige) of harde huid bevatten, of in gebieden met littekens of huidstriemen**. Patiënten met **psoriasis** mogen niet rechtstreeks injecteren in **opgezwollen, dikke, rode of schilferige huidplekken of huidletsels**.¹


4. Oefenen voor zelfinjectie

Uw oefenpatroon dient **alleen om te oefenen** en **bevat geen naald of medicijn**.²

Om uw oefeninjectie te beginnen, **duwt u de oefenpatroon recht door het klepje, zonder te draaien**, tot hij niet verder geduwd kan worden. Het apparaat start **automatisch in de oefenmodus**.

Na gebruik **zet u de oefenpatroon weer in elkaar door de groeven op één lijn te brengen en de patroon en de kap in elkaar te schuiven** totdat ze vastklikken. **Bewaar de patroon bij het apparaat tot uw volgende oefensessie**.²

De oefenpatroon kan **tot 20 keer gebruikt worden**.²

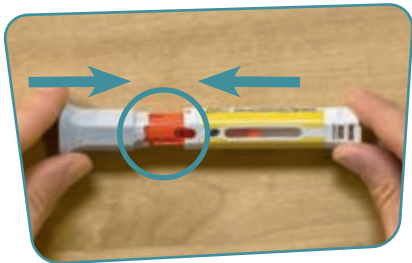

5. Zelfinjectie

STAP 1

Reinig uw huid op de injectieplaats met een alcoholdoekje en zorg dat de huid droog is voordat u met de injectie begint.¹



STAP 2

Reinig voorzichtig het injectie-uiteinde van het SMARTCLIC®-apparaat met een ander alcoholdoekje,¹ waarbij u erop let dat er geen vocht in het klepje terechtkomt.²



STAP 3

Duw de Enbrel®-patroon recht door het klepje zonder te draaien totdat u hem niet verder kunt duwen.¹

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld als een patroon correct geplaatst is.¹

Als het apparaat valt terwijl er een patroon inzit, dan moet u de patroon verwijderen en weggooien en het apparaat niet gebruiken als het beschadigd lijkt.^{1,2}

Als het apparaat een foutmelding geeft, raadpleeg dan Hoofdstuk 6 in de Gebruikershandleiding.²



STAP 4

Trek het naalddopje krachtig naar beneden om hem te verwijderen.¹



STAP 5


Houd het apparaat comfortabel op uw huid, zorg ervoor dat de blauwe pijl in een hoek van 90 graden naar uw injectieplaats wijst en zorg ervoor dat u het scherm kunt zien.¹

Wanneer het apparaat correct op de huid geplaatst is, verschijnt ‘Press button’ (Druk op de knop) op het scherm.²



Houd het apparaat plat tegen uw huid²

Zelfinjectie

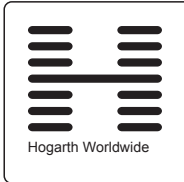

Project and Job Number CR12252_H214999_P418078	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm
Contact		Date & Time 22/11/2022 18:25

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



SMARTCLIC®

STAP 6

Houd de injectieknop ingedrukt om de injectie te beginnen.¹

U kunt de injectieknop loslaten nadat uw injectie begonnen is.¹

Houd het apparaat stabiel in deze positie tijdens de injectie.¹



Blijf tijdens het hele injectieproces naar het scherm kijken.¹

STAP 7

Zodra op het scherm ‘Lift off skin’ (Haal (het apparaat) van de huid) verschijnt, kunt u het apparaat bewegen.¹

Het apparaat mag niet bewogen, gekanteld of van de huid gehaald worden totdat het scherm dit aangeeft.¹



Project and Job Number CR12252_H214999_P418078	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm
Contact	Date & Time 22/11/2022 18:25	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



STAP 8

Druk (maar wrijf niet) in geval van bloeding met een wattenschijfje of gaasje op de injectieplaats totdat het bloeden stopt.¹



STAP 9

Nadat het apparaat de patroon gedeeltelijk uitgeworpen heeft, trekt u deze recht naar buiten.¹

Controleer of de patroon leeg is en of er een grijze balk zichtbaar is.¹

Als er medicijnresten zijn, moet u contact opnemen met een medische zorgverlener.¹

Als de patroon niet uitgeworpen wordt, dan mag u uw vingers niet in het apparaat steken omdat de naald blootligt,² en moet u contact opnemen met uw medische zorgverlener.



STAP 10

Gooi de gebruikte patroon weg in een daarvoor bestemd afvalbakje.¹

Raadpleeg voor meer gedetailleerde injectie-instructies de Enbrel® Bijsluiter en de SMARTCLIC® Gebruikershandleiding.

Zelfinjectie

6. Aanvullende informatie

SMARTCLIC® reinigen en bewaren

Het apparaat moet bij kamertemperatuur (max. 25°C) in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden om blootstelling aan vuil, stof, vloeistof en andere stoffen te beperken.²



Buiten bereik van kinderen bewaren.¹


Niet bewaren in vochtige of natte ruimten, zoals een badkamer/doucheruimte.²

Leg het apparaat niet in de vriezer.²

Reizen met uw apparaat en medicatie


Het is mogelijk om met SMARTCLIC te reizen, aangezien de Enbrel®-patronen uit de koelkast gehaald kunnen worden en bij kamertemperatuur (tot 25 °C) kunnen bewaard worden voor een periode van maximaal 4 weken.¹

De Enbrel-patronen mogen niet in de koelkast teruggezet worden nadat ze kamertemperatuur (max. 25°C) bereikt hebben.¹

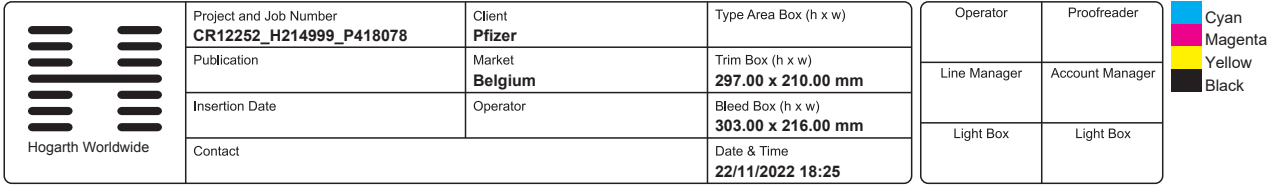[illegible]

[illegible]

 Hogarth Worldwide	Project and Job Number CR12252_H214999_P418078	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)	Operator	Proofreader	Cyan Magenta Yellow Black
	Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm	Line Manager	Account Manager	
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm	Light Box	Light Box	
	Contact		Date & Time 22/11/2022 18:25			

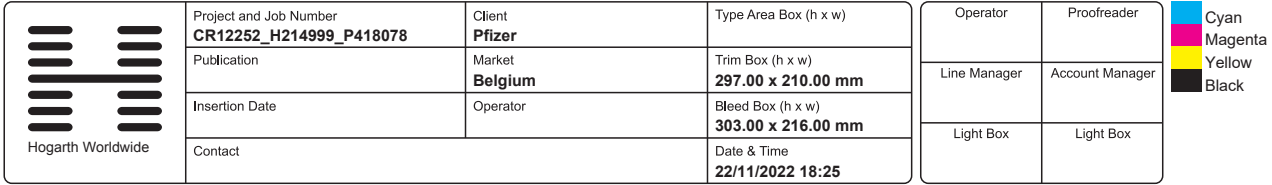[illegible]


SMARTCLIC®

220665 - OKT 2022

Referenties: 1. Enbrel SmPC. 2. SMARTCLIC-gebruikershandleiding.

Verantwoordelijke uitgever: Pfizer NV Pleinlaan 17 1050 Brussel



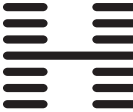

Hogarth Worldwide

Project and Job Number CR12252_H214999_P418078	Client Pfizer	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Belgium	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 303.00 x 216.00 mm
Contact	Date & Time 22/11/2022 18:25	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan

Magenta

Yellow

Black